




PHOTON 4 HEALTH

NEXT LEVEL LIGHT THERAPY

BODYSLIMMER PRO SNELLE START UITLEG

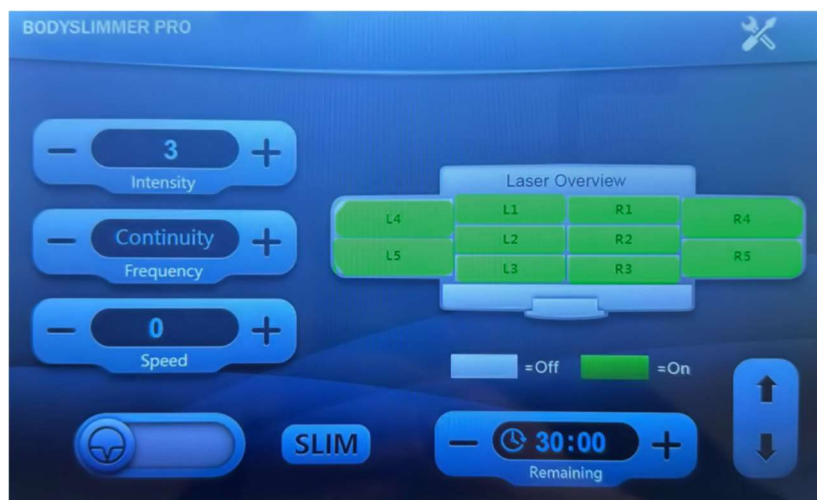

U kunt ervoor kiezen om te behandelen met handmatig geselecteerde instellingen of met het **SLIM**-programma (aanbevolen). De bovenstaande afbeelding toont het instellingenschermb. Als er vooraf een code wordt gevraagd, druk dan herhaaldelijk op 8 totdat het codeschermb verdwijnt. Links, bij '**Intensity**', kunt u de lichtintensiteit wijzigen van 1 tot 10. Wij adviseren om alleen te behandelen op stand 6, 7, 8, 9 of 10. Hoe dikker de vetlaag, hoe hoger de stand. Voor een gemiddeld persoon is stand **8** het beste. Daaronder, onder '**Frequency**', kunt u de pulsatie van het licht instellen van 0 tot 20 Hz. '**Continuity**' betekent continu licht (0 Hz) zonder pulsatie. Tot slot kunt u onder '**Speed**' de rotatiesnelheid van de lasers aanpassen. Wij adviseren om dit altijd op 2 of 3 in te stellen. Pas indien nodig de behandeltime aan bij 'Remaining' en start de behandeling door op de schuifbalk naast het SLIM-icoontje te klikken.



Het SLIM-programma

Om optimale resultaten te bereiken, hebben we een automatisch programma van 30 minuten ontwikkeld dat lichtintensiteiten, rotatiesnelheden en pulsaties varieert en afwisselt. Zo krijgen zoveel mogelijk vetcellen de juiste stimulatie voor het gewenste effect. Om dit programma te starten, drukt u op de **SLIM**-knop en vervolgens op het Play-icoontje.

(Pauzeren of de lamphoogte aanpassen tussen de behandelingen door is mogelijk)

(Optimale behandelafstand laser tot lichaam = 25 tot 35 cm)

