




PHOTON 4 HEALTH

NEXT LEVEL LIGHT THERAPY

REDPOWER @HOME SNELLE START UITLEG

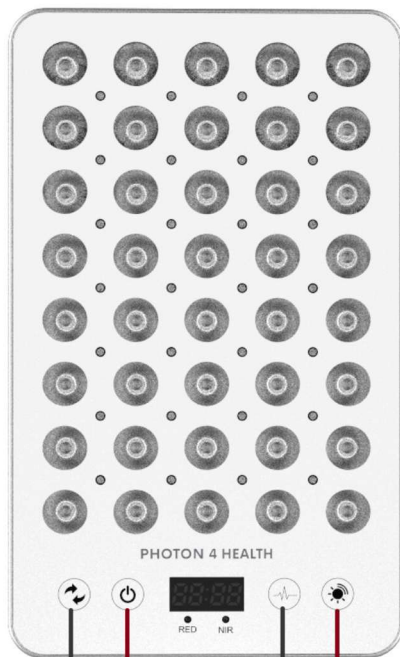

Lichtsterkte 25/50/75/100
Hersengolven 3/6/9/11/25/40
Snelprogramma 50% led + 11hz alpha hersen
Snelprogramma 100% led + geen hersengolven



Start (of herstart) een behandelcyclus van 10 minuten door op de pijltjesknop te drukken. Het programma wordt gestart op 100% lichtsterkte zonder hersengolven. Het standaard-protocol bestaat uit 10 minuten behandeling van de achterkant van het hoofd, 10 minuten behandeling van de onderrug, 10 minuten behandeling van het gezicht en 10 minuten behandeling van de buik (twee keer per week). Wanneer u de achterkant van het hoofd of het gezicht behandelt, is het raadzaam om dit te doen mét hersengolven. Tenzij u een specifiek doel heeft, raden wij aan om 11 Hz (alfa) te selecteren.



Druk herhaaldelijk op de pulsknop tot er 11 staat. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het te veranderen naar 1 van de 5 andere hersengolf programma's die in het apparaat voorgeprogrammeerd zijn door op de pulsknop te drukken. Je kunt controleren of er een hersenprogramma actief is met het NIR lampje (onder de timer). Als het knippert, is er een hersengolfprogramma actief. Als je andere lichaamsdelen behandelt, zoals de buik, is het niet nodig om hersengolven in te schakelen. Wanneer de lamp op je gezicht is gericht, raden we aan je ogen te sluiten.

Hersengolf programma's

3Hz	=	Delta	=	Bevordering van de diepe Delta slaap
6Hz	=	Theta	=	Bevordering van de droomslaap
9Hz	=	Slow-Alpha	=	Bevordering van diepe ontspanning/meditatie
11Hz	=	Alpha	=	Voor ontspanning en creativiteit en punitiviteit
25Hz	=	Beta	=	Bevordering van leerprocessen en concentratie
40Hz	=	Gamma	=	Actieve stimulatie alleen bij Alzheimer/ Parkinson

(meer info over hersengolven? Zie: photon4health.nl/Hersenfrequentitherapie)

(meer info over biofotonen therapie? Zie: photon4health.nl/Wat-is-biofotonen-therapie)