



PHOTON 4 HEALTH

NEXT LEVEL LIGHT THERAPY

REDPOWER PRO - SCHNELLSTARTERKLÄRUNG



Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie irgendwo auf den Startbildschirm, um das Auswahlmü „**Nur Infrarot**“ und „**Normalmodus**“ zu öffnen. Behandeln Sie nur mit Infrarot? Dann werden die roten LEDs und die grün/blau/roten Laser ausgeschaltet. Die Behandlung erfolgt dann ausschließlich mit Infrarot-LEDs und Infrarot-Lasern. Nützlich für eine Nachtbehandlung oder für Menschen, die empfindlich auf Licht oder Lichtblitze reagieren. Meistens werden Sie jedoch im „**Normalmodus**“ behandeln. Drücken Sie diese Taste, um zum Behandlungsmenü zu gelangen.

Standardmäßig ist beim Gehirnwellenstimulationsprogramm „**BASIC ALPHA**“ die Lichtintensität auf 2 von maximal 3 und die Zeit auf 10:00 Minuten eingestellt. Denn eine Behandlungsroutine beginnt immer mit einer 10-minütigen Behandlung am Hinterkopf, gefolgt von einer 10-minütigen Behandlung im Gesicht. (Natürlich können Sie auch ein anderes Gehirnprogramm auswählen, indem Sie auf eines der anderen 5 Programme rechts klicken.) Klicken Sie auf **START**, um eine 10-minütige Behandlungsrunde zu beginnen. Nach 10 Minuten am Hinterkopf und 10 Minuten an der Stirn behandeln wir 10 Minuten lang den Bauch. Das Licht kann nun auf Stärke 3 eingestellt werden, indem man mit den Pfeiltasten bei Energie die Zahl 2 auf 3 ändert. Für Behandlungen die nicht am Kopf stattfinden, wie zum Beispiel am Bauch. Es ist nicht notwendig, ein Gehirnprogramm eingeschaltet zu haben. Klicken Sie einmal auf BASIC ALPHA (oder das aktuell ausgeführte Gehirnprogramm), um diese Funktion auszuschalten, sodass kein Gehirnwellenprogramm mehr hellblau gefärbt wird.



Programme zur Gehirnwellenstimulation

<i>DELTA SLEEP</i>	=	<i>Förderung des tiefen Deltaschlafs</i>
<i>THETA DREAM</i>	=	<i>Förderung von Traumschlaf und tiefer Meditation</i>
<i>SLOW ALPHA</i>	=	<i>Förderung tiefer Entspannung/Meditation</i>
<i>BASIC ALPHA</i>	=	<i>Für Entspannung, Fröhlichkeit und Kreativität, Antidepressivum</i>
<i>FAST BETA</i>	=	<i>Förderung von Lernprozessen und Konzentration</i>
<i>ACTIVE GAMMA</i>	=	<i>Aktive Hirnstimulation bei Demenz und Parkinson</i>