



PHOTON 4 HEALTH

NEXT LEVEL LIGHT THERAPY

REDPOWER PRO SNELLE START UITLEG



Zet het apparaat aan en druk ergens op het opstartscherm om het **Infrared Only** en **Normal mode** keuzemenu te openen. Behandelt u op **Infrared Only** ? Dan zullen de rode leds en de groene/blauwe/rode lasers uitgeschakeld worden. U behandelt dan enkel met de infrarode leds en infrarode lasers. Handig voor een nacht behandeling of bij mensen die gevoelig zijn voor licht of lichtflitsen. 90% van de tijd echter zult u behandelen op de 'Normal mode'. Druk hierop om naar het behandelmenu te gaan.

Standaard staat de lichtsterkte op 2 van maximaal 3 en de tijd op 10:00 minuten met het hersen-golf stimulatie programma '**BASIC ALPHA**'. Dit omdat een behalelroutine altijd begint met 10 minuten behandelen op het achterhoofd waarna we 10 minuten behandelen op het gezicht. (Uiteraard kunt u ook kiezen voor een ander hersen programma door rechts op 1 van de andere 5 programma's te klikken). Start een 10 minuten durende behandelcyclus door te drukken op **START**. Na 10 minuten achterhoofd en 10 minuten voorhoofd behandelen we 10 minuten de buik. Het licht mag nu op



sterkte 3 door met de pijltjestoetsen bij **Energy** het getal 2 naar 3 te veranderen. Voor behandelingen die niet op het hoofd plaatsvinden, zoals de buik. Is het niet nodig een hersenprogramma aan te hebben staan. Klik 1 maal op **BASIC ALPHA** (of het hersen programma wat op dat moment aanstaat) om deze functie uit te zetten zodat er geen hersengolf-programma meer lichtblauw kleurt.

Hersengolf stimulatie programma's

DELTA SLEEP	=	<i>Bevordering van de diepe Delta slaap</i>
THETA DREAM	=	<i>Bevordering van de droomslaap en diepe meditatie</i>
SLOW ALPHA	=	<i>Bevordering van diepe ontspanning/meditatie</i>
BASIC ALPHA	=	<i>Voor ontspanning vrolijkheid en creativiteit, antidepressief</i>
FAST BETA	=	<i>Bevordering van leerprocessen en concentratie</i>
ACTIVE GAMMA	=	<i>Actieve stimulatie hersenen voor Dementie en Parkinson</i>

(meer info over hersengolven? Zie: photon4health.nl/Hersenfrequentitherapie

(meer info over biofotonen therapie? Zie: photon4health.nl/Wat-is-biofotonen-therapie