




Voice Control (stembediening)

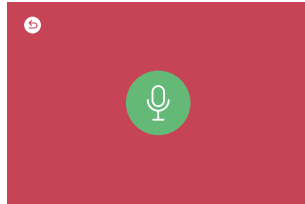

Schakel de
stembedienings-
functie in of uit

Stembediening is in het Engels. Commando geven?
Begin met **'Hello RED POWER'** / **'Hi RED POWER'**

gevolgd door:

- Run No Pulse mode
- Run DNA Repair mode
- Run Custom mode
- Run Delta Sleep mode
- Run Theta Dream mode
- Run Slow Alpha mode
- Run Basic Alpha mode
- Run Fast Beta mode
- Run Active Gamma mode
- Volume up/down
- Turn on/off Bluetooth
- Stop

Garantieclausule

- 1) De REDPOWER PRO XL heeft een fabrieksgarantie tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van drie (3) jaar vanaf de aankoopdatum(gratis reparatie of vervanging).
- 2) De garantie dekt niet de volgende schade(n): wijzigingen aan product, onjuiste installatie of gebruik, onjuiste reiniging, stroompieken of door de natuur veroorzaakte schade.
- 3) De garantie dekt geen directe of indirecte schade aan derden.



PHOTON 4 HEALTH
NEXT LEVEL LIGHT THERAPY



PHOTON4HEALTH.NL




INFO@PHOTON4HEALTH.NL



+31 611049629




ZWOLLE, NEDERLAND

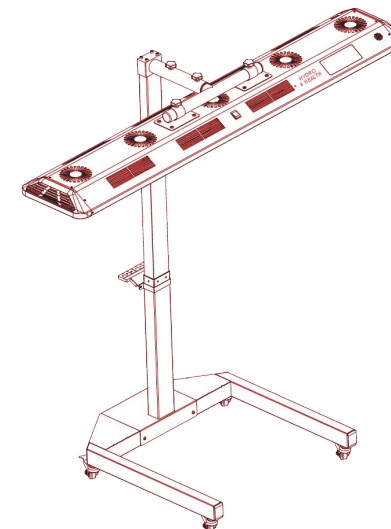


Medische Disclaimer

De REDPOWER PRO XL en de informatie in deze handleiding is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medisch professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De werking dit product en andere door ons benoemde middelen en/of claims, tips en adviezen zijn niet per se wetenschappelijk bewezen. Alle door ons gestelde (medische) claims en gestelde gezondheidsvoordelen berusten enkel en alleen op onze persoonlijke ervaring die we hebben gehad met onze cliënten. Noch de gegeven informatie, noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en zijn niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een medische (zelf)diagnose. De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de lezer van deze brochure of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat lezers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen. In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op/in onze website/brochure/filmpjes/boeken/afbeeldingen/webinars kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van het contact tussen de lezer (of diens familielid of andere naasten) en diens behandelend arts of andere professionele hulpverlener en de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt. Lezers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Lezers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt lezers geadviseerd contact op te nemen met hun eigen arts of het noodnummer.

GEBRUIKSHANDLEIDING

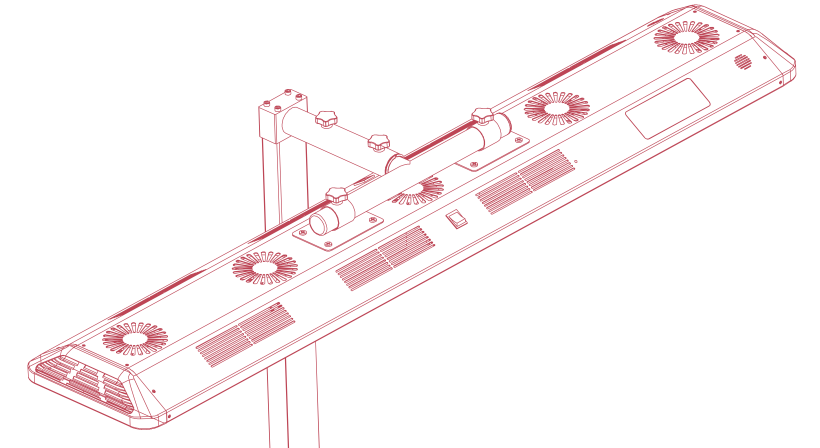

PHOTON 4 HEALTH
NEXT LEVEL LIGHT THERAPY

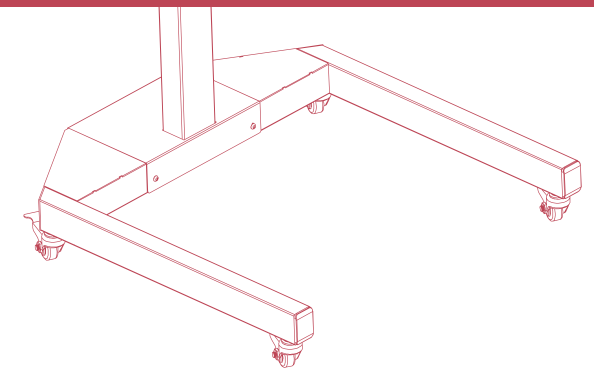

REDPOWER PRO XL

Gefeliciteerd met de aankoop van uw REDPOWER PRO XL fotonentherapie lamp. De REDPOWER PRO XL is de krachtigste fotonentherapielamp ter wereld en is het resultaat van 10 jaar lang onderzoek en ervaring met ruim 10.000 patiënten. De REDPOWER PRO XL combineert (infra)rood licht therapie, laser biofotonen-therapie, laser ATP-therapie en Tesla magneetveld therapie in 1 apparaat en zal enorm bijdragen aan uw algehele gezondheid en dat van uw patiënten



9 verschillende modi

NO PULSE
Ongepulst

DNA REPAIR
528Hz

CUSTOM
Aangepaste waarden

DELTA SLEEP
Slaap verbetering

THETA DREAM
Droom stimulatie

SLOW ALPHA
Diepe ontspanning

BASIC ALPHA
Ontspaning

FAST BETA
Leren/Creativiteit

ACTIVE GAMMA
Dementie/Alzheimer

Swipe voor pagina

volgende pagina


Terug naar de vorige pagina

Behandeling starten

Schakel het apparaat in, het apparaat zal opstarten en het startscherm weergeven waar u 9 verschillende modi ziet. 8 voorgeprogrammeerde modi + 1 CUSTOM modus die u naar eigen voorkeur kunt instellen. (Lichtintensiteit, behandelingsduur en pulsatie van de infrarood-LED+LASER).


De voorgeprogrammeerde modi hebben elk een behandel tijd van 15 minuten. Klik op het pictogram van de modus die u wilt starten. Of start het programma via de geïntegreerde stembediening. (zie verderop in deze handleiding). (Afstand lamp tot lichaam 15 tot 20cm)

Wij raden aan het apparaat dagelijks 15 minuten te gebruiken. Langer mag, maar heeft geen toegevoegde waarde. Met uitzondering van eventuele aanvullende behandelingen NA zware lichamelijke inspanning zoals sport. Behandel dan om de hersteltijd te verkorten en blessures te verminderen. Het is het beste om jezelf 's ochtends te behandelen. Behandel de voor- EN achterkant van je lichaam in 15 minuten. Behandel uw gezicht met de kant waar de witte plaat/beeldscherm zit. Het licht aan deze kant is veilig voor uw ogen.

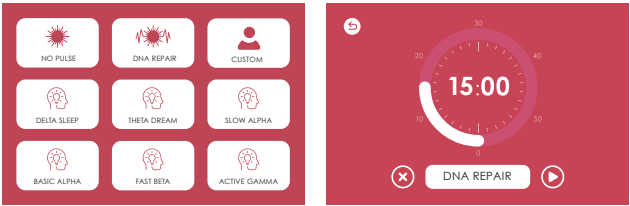

Bluetooth

Schakel optioneel Bluetooth in, zoek apparaat "REDPOWER" in uw telefoon, maak verbinding om muziek af te spelen!

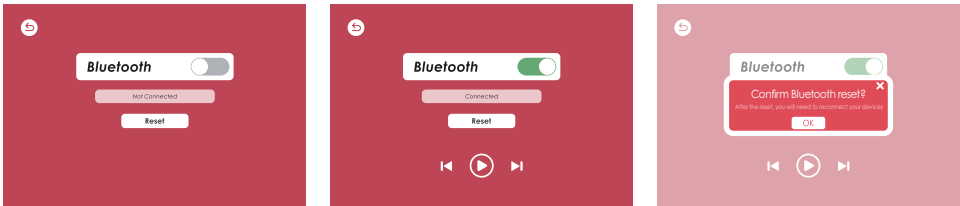

Technische specificaties

PHOTON 4 HEALTH
REDPOWER PRO XL

176 stuks medische kwaliteit 6mW lasers
384 stuks medische kwaliteit hoog vermogen leds.
Maximaal stroomverbruik 600 Watt

7 led golflengten voor maximale resultaten

630nm + 660nm
785nm + 810nm
830nm + 850nm + 940nm

4 laser golflengten voor maximale resultaten ATP-

therapie: 450nm + 520nm + 650nm
Biofotonen-therapie: 785nm

Magneetveldtherpie

Tesla spoelen met ALPHA en
Schumann-resonantie

Afmetingen lichtunit

164 * 30 * 7,5 cm

Gewicht

Totaal gewicht 50 kg
Lamp unit = 23 kg, statief 27kg

Veiligheidsmaatregelen

Bescherming tegen kortsluiting
Piekstroom beveiliging
Bescherming tegen oververhitting

