



PHOTON 4 HEALTH
NEXT LEVEL LIGHT THERAPY

DEUTSCHE BENUTZERHANDBUCH



BRAINHEALER®
BASIC

► DANKE


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem BRAINHEALER® BASIC Biophotonentherapiegerät. Dieses innovative Gerät basiert auf über 12 Jahren Erfahrung in der Biophotonentherapie mit mehr als 10.000 Anwendern. Wir freuen uns, dass Sie Teil der Gesundheitsrevolution sind, die durch diese neue Generation leichter Biophotonentherapiegeräte – den BRAINHEALER® BASIC und den BRAINHEALER® GUTBRAIN – ermöglicht wird. Die von PHOTON 4 HEALTH® verwendeten Lichtwellenlängen (Lichtfarben) haben sich in Hunderten von wissenschaftlichen Studien als wirksam erwiesen. Jeder BRAINHEALER® BASIC verfügt zudem über ein patentiertes Frequenzmodulationsprogramm, das die Gehirnwellenfunktion und die natürlichen Heilungsprozesse des Körpers unterstützt. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Anwendung sorgfältig durch, um eine optimale und sichere Anwendung des Geräts und damit beste Ergebnisse zu gewährleisten.

BEACHTEN


Für optimale Ergebnisse betreiben Sie Ihren BRAINHEALER BASIC (und gegebenenfalls Ihren BRAINHEALER GUTBRAIN) ausschließlich mit der BRAINHEALER Powerbank.



► PRODUKTDIAGRAMM

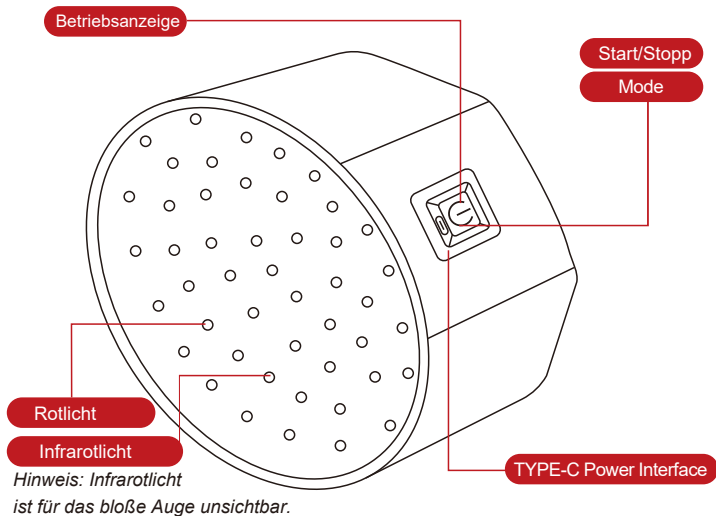

WAS IST ENTHALTEN?

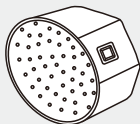

• Mütze x 1



• Powerbank
+ ladegerät



• Benutzerhandbuch



• USB-C-Kabela



• Aluminiumkoffer

STANDBY-MODUS

Wenn die Modusanzeige grün leuchtet, bedeutet dies, dass der BRAINHEALER mit Strom versorgt wird, aber kein Programm aktiv ist.



BRAINHEALER

Einmal drücken, und die Modusanzeige leuchtet blau. Sobald die Anzeige blau leuchtet, ist das patentierte 30-minütige BRAINHEALER-Programm aktiv.



SCHLAFPROGRAMM


Drücken Sie erneut, um die Modusanzeige rot leuchten zu lassen. Dies signalisiert, dass das 10-minütige Schlafprogramm aktiviert ist. Es werden ausschließlich schlaffördernde Gehirnwellen ausgesendet. Nutzen Sie dieses Programm kurz vor dem Schlafengehen, um Ihre Schlafqualität zu verbessern.



Das patentierte BRAINHEALER®-Programm nutzt Frequenzen, die Delta-, Theta-, Alpha-, Beta- und Gamma-Gehirnwellen ausgleichen. Diese Frequenzen werden mit Bioresonanzfrequenzen kombiniert, die Ihr allgemeines Wohlbefinden und Ihre Selbstheilungskräfte positiv beeinflussen. Die Anwendung erfolgt über rote/infrarot LEDs und patentierte Infrarot-Biophotonenlaser, welche die Biophotonenreserven des Körpers erhöhen und so die Zellkommunikation verbessern. Leider können wir keine medizinischen Aussagen zu den gesundheitlichen Vorteilen machen. Wir sind jedoch überzeugt, dass Sie bei täglicher Anwendung des BRAINHEALER die positiven Effekte schon bald selbst erleben und mit Ihren Lieben teilen werden.


1

Stecken Sie das USB-Kabel in die Powerbank und verbinden Sie es mit dem Netzschalter des BRAIN HEALER.

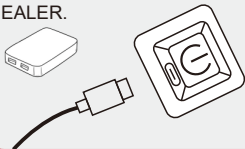


2

Wenn die Leuchte grün leuchtet, wird der BRAINHEALER® BASIC mit Strom versorgt. Leuchtet die Leuchte nicht grün, schalten Sie zuerst die Powerbank ein. Drücken Sie anschließend die grüne Taste am Brainhealer, um das BRAINHEALER-Programm zu starten (30 Minuten). Die Leuchte wechselt dann zu Blau. Möchten Sie das Schlafoptimierungsprogramm nutzen? (10 Minuten) Klicken Sie erneut, um zum Schlafoptimierungsprogramm zu wechseln; die Leuchte wechselt zu Rot.

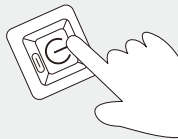

3

Setzen Sie den BRAINHEALER® BASIC auf Ihren Kopf.

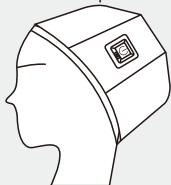

4

Wenn Sie auch einen BrainHealer GUTBRAIN besitzen, können Sie ihn gleichzeitig verwenden (es wird nur eine Powerbank benötigt).



5

Wenn ein Programm abgeschlossen ist, leuchtet die Kontrollleuchte wieder grün. Wenn Sie nichts tun, schaltet sich die Powerbank nach einer Minute automatisch aus.

► DIE MERKMALE UND VORTEILE

Die Gesundheit des Gehirns ist ein langfristiger Prozess, der Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Engagement erfordert. Es braucht Zeit und tägliche Anwendung. Hunderte klinische Studien haben bewiesen, dass die Biophotonentherapie die Gehirngesundheit, die allgemeine Gesundheit und die Selbstheilungskräfte positiv beeinflusst. Wir sind überzeugt, dass Ihr Körper von jeder Anwendung profitiert. Viele Faktoren können jedoch beeinflussen, wie schnell sich Ihre Symptome bessern. Im Allgemeinen kann es bis zu vier Wochen dauern, bis sich gesundheitliche Probleme bessern, vorausgesetzt, Sie verwenden das Produkt täglich. Durch die konsequente tägliche Anwendung können Sie die Aktivität Ihrer Selbstheilungskräfte maximieren.



Bei Fragen zu bestimmten Erkrankungen empfehlen wir Ihnen, einen vertrauenswürdigen Gesundheitsdienstleister oder Arzt zu konsultieren oder uns direkt für eine kostenlose Beratung zu kontaktieren.

Produktspezifikationen

Produktmarke: PHOTON 4 HEALTH® BRAINHEALER® Modellname: BASIC

LED-Anzahl : 108 (dual chips, 54*630nm chips+54*1070nm chips)

Laser Anzahl: 66 (48pcs*785nm, 6pcs*850nm, 6pcs*1070nm, 6pcs*665nm)

Behandlungsdauer: 30 Minuten oder 10 Minuten

Material : Lycra

Durchmesser: 20 cm

Gewicht: 150 g

Power : Type-c 5V-2A

Powerbank-Kapazität: 20.000 mAh
(6 Stunden Behandlungszeit mit einer Ladung)

▶ WARNUNG

- * Dieses Produkt darf niemals nass werden.
- * Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- * Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.
- * Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- * Tragen oder heben Sie das Gerät nicht am Netzkabel an.
- * Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen oder in heißer Umgebung.
- * Falten Sie das Gerät nicht und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- * Bewahren Sie das Gerät im Koffer auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

1 Bewahren Sie das Produkt und seine Bestandteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

2 Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie eine Organtransplantation hatten.

► GARANTIE

Dieses Produkt wird mit einer kostenlosen 3-Jahres-Garantie und lebenslangem Wartungsservice geliefert. Sollten innerhalb von 3 Jahren nach dem Kauf Probleme mit Ihrem Produkt auftreten (die nicht durch menschliches Eingreifen verursacht wurden), kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte beachten Sie: Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfälle, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstanden sind.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter:
www.photon4health.de oder per E-Mail an: **info@photon4health.de**

Dieses Gerät wird in den Niederlanden hergestellt von:
PHOTON 4 HEALTH B.V.
Zwartewaterallee 56
8031 DX Zwolle
Niederlande

