



**PHOTON 4 HEALTH**  
NEXT LEVEL LIGHT THERAPY

**DEUTSCHE  
BENUTZERHANDBUCH**



**BRAINHEALER®**  
PRO

## ► DANKE


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem BRAINHEALER® PRO Biophotonentherapiegerät. Dieses innovative Gerät basiert auf über 12 Jahren Erfahrung in der Biophotonentherapie mit mehr als 10.000 Anwendern. Wir freuen uns, dass Sie Teil der Gesundheitsrevolution sind, die durch diese neue Generation leichter Biophotonentherapiegeräte – den BRAINHEALER® PRO und den BRAINHEALER® GUTBRAIN – ermöglicht wird. Die von PHOTON 4 HEALTH® verwendeten Lichtwellenlängen (Lichtfarben) haben sich in Hunderten von wissenschaftlichen Studien als wirksam erwiesen. Jeder BRAINHEALER® PRO verfügt zudem über ein patentiertes Frequenzmodulationsprogramm, das die Gehirnwellenfunktion und die natürlichen Heilungsprozesse des Körpers unterstützt. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Anwendung sorgfältig durch, um eine optimale und sichere Anwendung des Geräts und damit beste Ergebnisse zu gewährleisten.

### BEACHTEN

*Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das Produkt stets nur in Kombination mit der mitgelieferten Powerbank.*



## ► PRODUKTDIAGRAMM

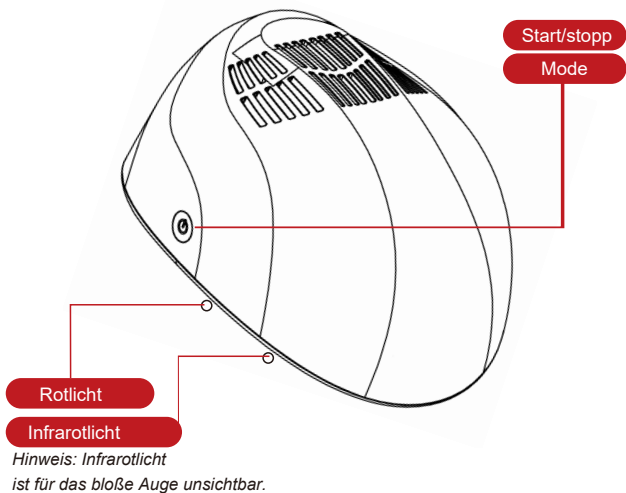

## WAS IST ENTHALTEN?



- Helm x 1



- Powerbank + ladegerät



- Benutzerhandbuch



- USB-C-Kabela



- Stoffkoffer

### STANDBY-MODUS

Wenn die Modusanzeige grün leuchtet, bedeutet dies, dass der BRAINHEALER® PRO mit Strom versorgt wird, aber kein Programm aktiv ist.



### BRAINHEALER

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die Kontrollleuchte leuchtet blau auf, und das patentierte BRAINHEALER-Behandlungsprogramm startet automatisch und läuft 30 Minuten lang.



### SCHLAFPROGRAMM


Drücken Sie erneut, um die Modusanzeige rot leuchten zu lassen. Dies signalisiert, dass das 10-minütige Schlafprogramm aktiviert ist. Es werden ausschließlich schlaffördernde Gehirnwellen ausgesendet. Nutzen Sie dieses Programm kurz vor dem Schlafengehen, um Ihre Schlafqualität zu verbessern.



Das patentierte BRAINHEALER®-Programm nutzt Frequenzen, die Delta-, Theta-, Alpha-, Beta- und Gamma-Gehirnwellen ausgleichen. Diese Frequenzen werden mit Bioresonanzfrequenzen kombiniert, die Ihr allgemeines Wohlbefinden und Ihre Selbstheilungskräfte positiv beeinflussen. Die Anwendung erfolgt über rote/infrarot LEDs und patentierte Infrarot-Biophotonenlaser, welche die Biophotonenreserven des Körpers erhöhen und so die Zellkommunikation verbessern. Leider können wir keine medizinischen Aussagen zu den gesundheitlichen Vorteilen machen. Wir sind jedoch überzeugt, dass Sie bei täglicher Anwendung des BRAINHEALER die positiven Effekte schon bald selbst erleben und mit Ihren Lieben teilen werden.

1

Stecken Sie das USB-Kabel in die Powerbank und verbinden Sie es mit dem BRAINHEALER®.

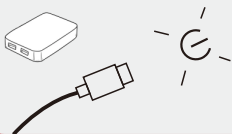

2

Wenn die Leuchte grün leuchtet, wird der BRAINHEALER® mit Strom versorgt. (Sollte die Leuchte nicht grün leuchten, schalten Sie sie bitte zuerst über den Knopf an der Powerbank ein.) Drücken Sie anschließend den Ein-/Ausmacher an der Seite des Brainhealers, um das BRAINHEALER-Programm (30 Minuten) zu starten. Die Leuchte wechselt dann zu Blau. Wenn Sie das Schlafoptimierungsprogramm (10 Minuten) bevorzugen, drücken Sie den Knopf erneut, um zum Schlafoptimierungsprogramm zu wechseln; die Leuchte leuchtet dann zu Rot.



3

Setzen Sie den BRAINHEALER® auf Ihren Kopf.



4

Falls Sie auch einen BRAINHEALER® GUTBRAIN besitzen, können Sie ihn gleichzeitig einschalten :-)



Nach Abschluss eines Programms leuchtet die Kontrollleuchte wieder grün. Zum Ausschalten halten Sie den Ein-/Ausmacher 2 Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie nichts tun, schaltet sich der Brainhealer automatisch aus.

## ► DIE MERKMALE UND VORTEILE

Die Gesundheit des Gehirns ist ein langfristiger Prozess, der Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Engagement erfordert. Es braucht Zeit und tägliche Anwendung. Hunderte klinische Studien haben bewiesen, dass die Biophotonentherapie die Gehirngesundheit, die allgemeine Gesundheit und die Selbstheilungskräfte positiv beeinflusst. Wir sind überzeugt, dass Ihr Körper von jeder Anwendung profitiert. Viele Faktoren können jedoch beeinflussen, wie schnell sich Ihre Symptome bessern. Im Allgemeinen kann es bis zu vier Wochen dauern, bis sich gesundheitliche Probleme bessern, vorausgesetzt, Sie verwenden das Produkt täglich. Durch die konsequente tägliche Anwendung können Sie die Aktivität Ihrer Selbstheilungskräfte maximieren.



*Bei Fragen zu bestimmten Erkrankungen empfehlen wir Ihnen, einen vertrauenswürdigen Gesundheitsdienstleister oder Arzt zu konsultieren oder uns direkt für eine kostenlose Beratung zu kontaktieren.*

## Produktspezifikationen

Produktmarke: PHOTON 4 HEALTH® BRAINHEALER® Modellname: PRO

LED-Anzahl : 220 (dual chips, 110\*810nm +110\*1070nm)

Laser Anzahl: 80 (62x 785nm, 6x 450nm, 6x 520nm, 6x 450nm)

Behandlungsdauer: 30 Minuten oder 10 Minuten

Material : Plastik

Durchmesser: 20 cm

Gewicht: 650 g

Power : Type-c 7V-5A

Powerbank-Kapazität: 30.000 mAh  
(4 Stunden Behandlungszeit mit einer Ladung)

## ► WARNUNG

- \* Dieses Produkt darf niemals nass werden.
- \* Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- \* Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.
- \* Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- \* Tragen oder heben Sie das Gerät nicht am Netzkabel an.
- \* Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen oder in heißer Umgebung.
- \* Falten Sie das Gerät nicht und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- \* Bewahren Sie das Gerät im Koffer auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

**1 Bewahren Sie das Produkt und seine Bestandteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**

**2 Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie eine Organtransplantation hatten.**

## ► GARANTIE

Dieses Produkt wird mit einer kostenlosen 3-Jahres-Garantie und lebenslangem Wartungsservice geliefert. Sollten innerhalb von 3 Jahren nach dem Kauf Probleme mit Ihrem Produkt auftreten (die nicht durch menschliches Eingreifen verursacht wurden), kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte beachten Sie: Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfälle, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstanden sind.

**Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter:**

**[www.photon4health.de](http://www.photon4health.de) oder per E-Mail an: [info@photon4health.de](mailto:info@photon4health.de)**

Dieses Gerät wird in den Niederlanden hergestellt von:

**PHOTON 4 HEALTH B.V.**

Zwartewaterallee 56

8031 DX Zwolle

Niederlande

