



PHOTON 4 HEALTH
NEXT LEVEL LIGHT THERAPY

**DEUTSCHE
BENUTZERHANDBUCH**



BRAINHEALER®
GUTBRAIN

► DANKE


Vielen Dank für den Kauf des Biophotonentherapiegeräts BRAINHEALER® GUTBRAIN. GUTBRAIN steht für Darm-Hirn, denn wir sind überzeugt, dass Ihr Darm ein wichtiger Teil Ihres Gehirns ist. Dieses Gerät basiert auf 12 Jahren Erfahrung mit über 10.000 Anwendern. Wir freuen uns, Sie in dieser neuen Generation leichter Biophotonentherapiegeräte, darunter der BRAINHEALER® GUTBRAIN und der BRAINHEALER® BASIC, begrüßen zu dürfen. Die von PHOTON 4 HEALTH® verwendeten Lichtwellenlängen sind wissenschaftlich erwiesen wirksam, und das Gerät ist mit einem patentierten Frequenzmodulationsprogramm ausgestattet, das Ihre Darm-Hirn-Achse optimiert. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Anwendung sorgfältig durch, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

BEACHTEN

Für optimale Ergebnisse betreiben Sie Ihren BRAINHEALER GUTBRAIN (und gegebenenfalls Ihren BRAINHEALER) ausschließlich mit der BRAINHEALER Powerbank.



► PRODUKTDIAGRAMM

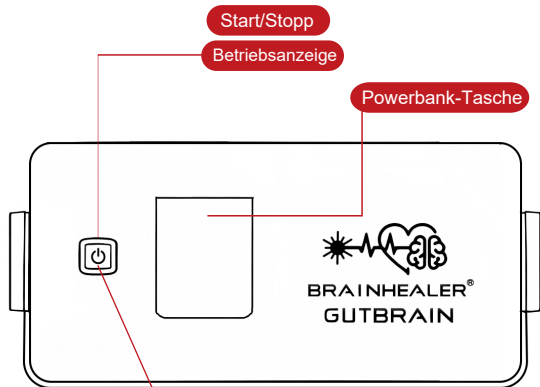

Rotlicht

Infrarotlicht

*Hinweis: Infrarotlicht
ist für das bloße Auge unsichtbar.*

TYPE-C Power Interface

WAS IST ENTHALTEN?



• Gürtel x 1



• Powerbank
+ ladegerät



• Benutzerhandbuch



• USB-C-Kabel



• Aluminiumkoffer




STANDBY-MODUS

Wenn die Modusanzeige grün leuchtet, bedeutet dies, dass das BRAINHEALER GUTBRAIN mit Strom versorgt wird, aber kein Programm aktiv ist.



BEHANDLUNG


Einmal drücken, und die Modusanzeige leuchtet blau. Sobald die Anzeige blau leuchtet, ist das patentierte 30-minütige BRAINHEALER GUTBRAIN-Programm aktiv.

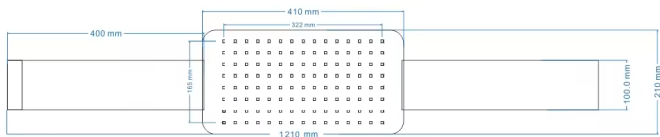

Das patentierte BRAINHEALER® GUTBRAIN-Programm nutzt Bioresonanzfrequenzen, die Ihr allgemeines Wohlbefinden und Ihre Selbstheilungskräfte positiv beeinflussen. Dies geschieht durch rote/infrarote LEDs und patentierte Infrarot-Biophotonenlaser, welche die Biophotonenreserven des Körpers erhöhen und so die Zellkommunikation verbessern. Leider können wir keine medizinischen Aussagen zu den gesundheitlichen Vorteilen treffen. Wir sind jedoch überzeugt, dass Sie bei täglicher Anwendung des BRAINHEALER die erstaunlichen Effekte schon bald selbst erleben und mit Ihren Lieben teilen werden.


1

Stecken Sie das USB-Kabel in die Powerbank und verbinden Sie es mit dem Netzschalter am GUT BRAIN.

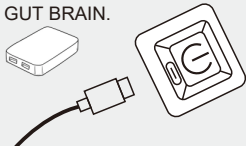


2

Wenn die Leuchte grün leuchtet, bedeutet dies, dass der BRAINHEALER® GUTBRAIN mit Strom versorgt wird. Leuchtet die Leuchte nicht grün, schalten Sie zuerst die Powerbank ein. Drücken Sie anschließend die grüne Taste am Brainhealer, um das BRAINHEALER® GUTBRAIN-Programm (30 Minuten) zu starten. Die Leuchte wechselt dann auf blau.

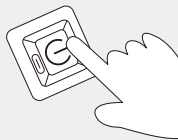

3

Legen Sie den BRAINHEALER® GUTBRAIN auf Ihre nackte Haut.

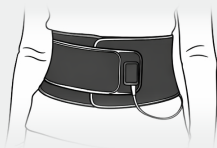

4

Falls Sie auch einen regulären BRAINHEALER besitzen, können Sie ihn gleichzeitig einschalt



Sobald das Programm abgeschlossen ist, leuchtet die Kontrollleuchte wieder grün. Wenn Sie nichts unternehmen, schaltet sich die Powerbank nach einer Minute automatisch aus.

► DIE MERKMALE UND VORTEILE

Darmhirngesundheit ist ein langfristiger Prozess, der Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Engagement erfordert. Es braucht Zeit und tägliche Anwendung. Hunderte klinische Studien haben bewiesen, dass die Biophotonentherapie die Gesundheit von Gehirn und Darm, das allgemeine Wohlbefinden und die Selbstheilungskräfte positiv beeinflusst. Wir sind überzeugt, dass Ihr Körper von jeder Anwendung profitiert. Viele Faktoren können jedoch beeinflussen, wie schnell sich Ihre Symptome bessern. Im Allgemeinen kann es bis zu vier Wochen dauern, bis sich gesundheitliche Probleme bessern, vorausgesetzt, Sie verwenden das Produkt täglich. Durch die konsequente tägliche Anwendung können Sie Ihre Selbstheilungskräfte optimal aktivieren.



Bei Fragen zu bestimmten Erkrankungen empfehlen wir Ihnen, einen vertrauenswürdigen Gesundheitsdienstleister oder Arzt zu konsultieren oder uns direkt für eine kostenlose Beratung zu kontaktieren.

Produktspezifikationen

Produktmarke: PHOTON 4 HEALTH® BRAINHEALER® Modellname: GUTBRAIN

LED-Anzahl: 56 (dual chips, 56pcs 630nm chips+56pcs 1070nm chips)

Laser Anzahl: 64 (48pcs 785nm, 4pcs 850nm, 4pcs 1070nm, 4pcs 665nm)

Behandlungsdauer: 30 Minuten

Material : Lycra

Größe: 41 * 21 cm

Gewicht: 150 g

Power : Type-c 5V-2A

Powerbank-Kapazität: 20.000 mAh
(6 Stunden Behandlungszeit mit einer Ladung)

▶ WARNUNG

- * Dieses Produkt darf niemals nass werden.
- * Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- * Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.
- * Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- * Tragen oder heben Sie das Gerät nicht am Netzkabel an.
- * Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen oder in heißer Umgebung.
- * Falten Sie das Gerät nicht und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- * Bewahren Sie das Gerät im Koffer auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

1 Bewahren Sie das Produkt und seine Bestandteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

2 Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie eine Organtransplantation hatten.

► GARANTIE

Dieses Produkt wird mit einer kostenlosen 3-Jahres-Garantie und lebenslangem Wartungsservice geliefert. Sollten innerhalb von 3 Jahren nach dem Kauf Probleme mit Ihrem Produkt auftreten (die nicht durch menschliches Eingreifen verursacht wurden), kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte beachten Sie: Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfälle, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstanden sind.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter:
www.photon4health.de oder per E-Mail an: **info@photon4health.de**

Dieses Gerät wird in den Niederlanden hergestellt von:
PHOTON 4 HEALTH B.V.

Zwartewaterallee 56
8031 DX Zwolle
Niederlande

