



# PHOTON 4 HEALTH

NEXT LEVEL LIGHT THERAPY

## REDPOWER PRO SNELLE START UITLEG



Zet het apparaat aan en druk ergens op het opstartscherm om het **Infrared Only** en **Normal mode** keuzemenu te openen. Behandelt u op **Infrared Only** dan zullen de rode leds en de groene/blauwe/rode lasers uitgeschakeld worden. U behandelt dan enkel met de infrarode leds en infrarode lasers. Handig voor een nacht behandeling of bij mensen die gevoelig zijn voor licht of lichtflitsen. 90% van de tijd echter zult u behandelen op de 'Normal mode'. Druk nu op normal mode om naar het menu te gaan.

Standaard staat de behandeling **TOTAL WELLNESS** geselecteerd, dit is een geautomatiseerd 15 minuten durend programma welke alle hersen- en bioresonantiefrequenties toevoegt aan het licht. Het programma begint met lichtsterkte 1 gaat na 1 minuut na 2 en dan naar 3. Dit programma duurt 15 minuten en is werkzaam tegen alle klachten en problemen. We raden voor therapeuten aan dit programma bij hun patiënten 2x achter elkaar te doen. Eens op het gezicht, eens op de buik. Totaal 30 minuten dus. Gebruikt u de lamp thuis dan kunt u het afwisselen bij de volgende behandeldag met de behandelen van de achterkant van het lichaam: 15 minuten achterkant hoofd + 15 minuten onderrug. U kunt zo vaak behandelen als u wil. Elke dag, om de dag of eens in de paar dagen, eens per week. Het is naar eigen behoefte. Er is nog een tweede automatisch programma, het **SLEEP PROGRAM**, deze is erop gericht uw hersenen geleidelijk naar de DELTA slaap frequentie te brengen. Heeft u moeite met slapen probeer eens dit programma voor het slapen gaan. Is het rood licht nog te stimulerend start het programma dan in de "Infrared only" modus door te klikken op het huis icoontje rechtsboven, en dan op "infrared only" te klikken en dan op het **SLEEP PROGRAM** en dan op **START**. Het lijkt amper licht te geven, maar dat is niet zo. We kunnen het met onze ogen niet zien maar het lichaam ziet het wel. Het is naast deze 2 automatische programma's ook nog mogelijk om individuele hersenfrequenties toe te passen. Hieronder een kleine toelichting. Online en in onze brochure is er meer over te lezen.



<b>SLEEP PROGRAM</b>	=	<i>Delta hersen-frequenties ter bevordering van de diepe Delta slaap</i>
<b>THETA DREAM</b>	=	<i>Bevordering van de droomslaap en diepe meditatie</i>
<b>TOTAL WELLNESS</b>	=	<i>Mix van diverse hersenfrequenties + bioresonantie frequenties</i>
<b>RELAXING ALPHA</b>	=	<i>Voor ontspanning vrolijkheid en creativiteit, antidepressief</i>
<b>FAST BETA</b>	=	<i>Bevordering van leerprocessen en concentratie</i>
<b>ACTIVE GAMMA</b>	=	<i>Actieve stimulatie hersenen en geheugen bij Dementie</i>

*meer info over hersengolven? Zie: [photon4health.nl/Hersenfrequentitherapie](http://photon4health.nl/Hersenfrequentitherapie)*

*meer info over biofotonen therapie? Zie: [photon4health.nl/Wat-is-biofotonen-therapie](http://photon4health.nl/Wat-is-biofotonen-therapie)*